



DIALAB GmbH
Austria, A-2351 Wr. Neudorf
IZ-NÖ Süd
Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43(0)2236 660910-0
fax: ++43(0)2236 660910-30
office@dialab.at

»»» www.dialab.at

HITNA SIGURNOSNA NAPOMENA

7. Sječanj 2014

DOA SALIVA MULTI-6 TEST

Poštovani klijenti:

DIALAB ovom prilikom objavljuje hitnu sigurnosnu napomenu u vezi sa učinkom THC parametra na DOA SALIVA MULTI-6 TEST-u. Granica dokaza THC-a po oznakama na proizvodu iznosi 12 ng/ml. Međutim noviji podaci pokazuju da je $\geq 80\%$ rezultata pozitivno tek pri koncentraciji THC-a od 35 do 40 ng/ml. Stoga je jako moguća visoka stopa lažno negativnih rezultata kod uzoraka u koncentracijskom rasponu od 12 do 40 ng/ml. Povećana vjerojatnost visoke stope lažno negativnih rezultata kod uzoraka u navedenom koncentracijskom rasponu se odnosi na više proizvoda ovog tipa koji su trenutno na tržištu.

Molimo Vas imajte na umu da svi ostali screening testovi droga za dokazivanje preostalih substanci (osim THC-a) i dalje pružaju pouzdane rezultate.

DOA SALIVA MULTI-6 TEST je kromatografski imunotest za kvalitativni dokaz imenovanih droga i njihovih metabolita u pljuvačnoj tečnosti unutar navedenih dokaznih granica. Ovaj test pruža samo preliminarni rezultat analize. Za potvrdu rezultata potreban je daljnji, specifičniji postupak kemijske analize. Više informacija o ovom može se pronaći u uputama uz proizvod.

U priloženoj tabeli su navedeni dotični proizvodi.

Informirane su i nadležne ustanove vlada zemalja članica Europske Unije.

Molimo Vas da priloženu potvrdu ispunite i potpisanu nam vratite kao i da prosljedite ovu obavijest dotičnim klijentima. Pošaljite potvrdu natrag putem faksa ili skeniranu putem e-maila do 17. Sječnja 2014. godine.

Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Ako imate pitanja, mi smo, naravno, na raspolaganju.

S poštovanjem,
Vaš Dialab-team



DIALAB GmbH
Austria, A-2351 Wr. Neudorf
IZ-NÖ Süd
Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43(0)2236 660910-0
fax: ++43(0)2236 660910-30
office@dialab.at

>>> www.dialab.at

Dodatak: Spisak obuhvaćenih proizvoda

Tabela I

DOA SALIVA MULTI-6 TEST (COC/MET/PCP/THC/OPI/AMP)

REF: Z04580CE, Z09550B

Kit Lot No.
DOA2030114
DOA2060523
DOA2090422
DOA3030269
DOA3090621

Tabela II

DOA SALIVA MULTI-6/1 TEST (COC/THC/MET/MTD/OPI/AMP)

REF: Z08581CE, Z09553B

Kit Lot No.
DOA2050530
DOA2100325
DOA2120156
DOA3020462
DOA3030312
DOA3040245

POTVRDA

**Molimo ispunite ovaj obrazac i pošaljite putem faksa na broj:
+43 (0) 2236-660910-30 ili pošaljite skeniranu potvrdu putem e-maila
na sturm@dialab.at**

DOA SALIVA MULTI-6 TEST

1. Ja sam pročitao / pročitala i razumio / razumjela hitnu sigurnosnu napomenu o **DOA SALIVA MULTI-6 TEST**- u objavljenu od strane DIALAB GmbH, 7. Sječnja 2014. godine.
2. Ovim potvrđujem da su svi klijenti, koji su koristili ovaj proizvod, dobili dotičnu obavijest.
3. **MOLIMO DA ODABERETE SVA TOČNA POLJA I POTPISAN OBRAZAC** pošaljete putem faksa na +43 (0) 2236-660910-30 ili skeniranu putem e-maila na sturm@dialab.at.

- U našem posjedu nije ni jedan od dotičnih proizvoda.
- Dotični proizvodi su prosljeđeni drugoj ustanovi; kopija ove hitne sigurnosne napomene je također prosljeđjena toj ustanovi.
- Dotični proizvodi su u našem posjedu. Pročitali smo i razumjeli ovu hitnu sigurnosnu napomenu.

Potpis*:	Titula*:
Ime tiskanim slovima*:	Datum*:
Telefon*:	E-Mail:
Ustanova*:	Adresa*:

Molimo Vas da ispunite ovaj obrazac i vratite ga u roku od deset radnih dana.

*** OBVEZNO POLJE**