



Hitna sigurnosna obavijest

Ograničenje kod izračuna APEX vremena u PatientOnLine softveru verzija 6.2

Datum: 17. Prosinac, 2019

Poštovani,

Kao dio našeg kontinuiranog procesa osiguranja kvalitete identificirano je da prilikom korištenja metode APEX (Accelerated Peritoneal Equilibration Examination) izračunavanja vremena u PatientOnLine (POL) softveru verzija 6.2 može dovesti do devijantnih rezultata za APEX vrijeme. Izračun APEX vremena u POL 6.2 nije baziran na originalnom APEX testu koji je definiran i objavljen od strane Dr. C. Vergera.

Netočan izračun APEX vremena može dovesti neprimjerene terapije. Višestruki, uzastopni tretmani mogu rezultirati neuspješno u smislu klirensa i ultrafiltracije.

Kako bi izbjegli rizik od neprimjerene terapije molimo vas da više ne koristite opciju izračuna APEX vremena u POL 6.2 softveru.

Molim vas da osigurate da svi korisnici POL-a 6.2 u vašoj organizaciji budu informirani o ovoj sigurnosnoj obavijesti.

Iskreno se ispričavamo zbog neugodnosti te ćemo ispraviti ovu grešku u najkraćem mogućem roku.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte:

Jadranka Dujmović mr.pharm.

+385 91 78 241 79

e-mail: jadranka.dujmovic@fmc-ag.com

Sa štovanjem,

References Verger C, Larpent L, Veniez G, Brunetot N, Corvaisier B. L'APEX ... description et utilisation. Bull Dial Perit 1991; 1(2): 36-40.